

テーパドリッジエクspander


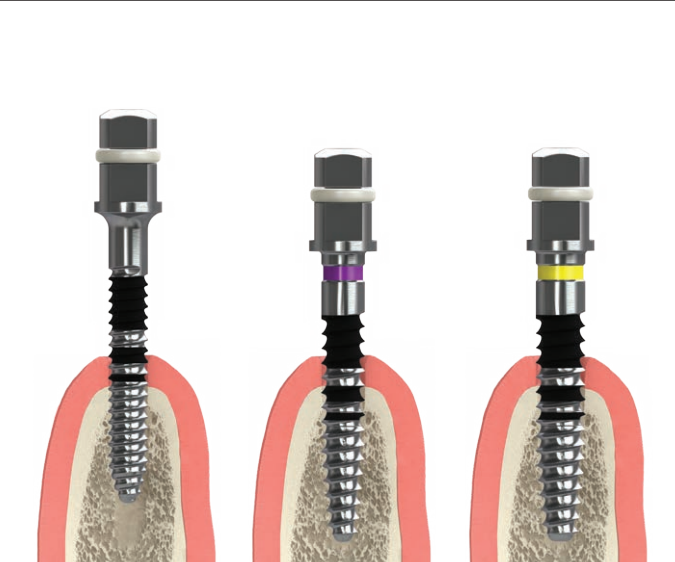
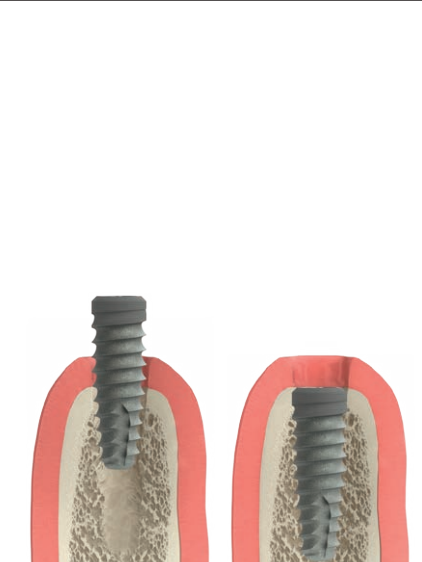
BioHorizons社のテーパドリッジエクspanderは、骨が柔らかい症例において、骨密度を圧縮することで初期固定を高めます。ラチェットまたはハンドレンチに装着して使用します。インプラント体直径が3.0mmから4.6mmまでのテーパードインプラントに対応可能です。

- TRE30 Ø3.0mm テーパドリッジエクspander
- TRE34 Ø3.4mm テーパドリッジエクspander
- TRE38 Ø3.8mm テーパドリッジエクspander
- TRE42 Ø4.2mm テーパドリッジエクspander
- TRE46 Ø4.6mm テーパドリッジエクspander



医療機器届出番号 13B1X10031000014 アンシラリーツール

テーパードインプラントおよびテーパードプラスインプラント(インプラント体直径3.8mm)の場合の外科手順

		
2.0mm スタータードリルを 用いて 埋入窩形成を開始	リッジエクspanderを使用し、 埋入するインプラント体直径の 骨孔が得られるまで、 埋入窩を拡大していきます。	インプラント体直径に合った 骨孔が形成されたら、 所定の深さまでインプラントを 埋入します。

Caiman Dental
株式会社 カイマンデンタル

〒102-0082 東京都千代田区一番町8番地15 一番町MYビル

▼ご注文・製品についてのお問い合わせは
TEL:03-3238-7560 FAX:03-3238-7561

<http://www.caimandental.com>

BIOHORIZONS[®]

BioHorizons[®] is a registered trademark of BioHorizons.
Not all products are available in all countries.
©BioHorizons. All Rights Reserved.

©2018 Caiman Dental Co., Ltd. All right reserved. 201808AMS