

インプラント治療のご案内

あなたの自信を取り戻すために



BIOHORIZONS[®]
SCIENCE • INNOVATION • SERVICE

歯を失って 悩んでいませんか？

ブリッジにしたら…

(P3 上)

- ・ブリッジを作るために健康な歯を削られてしまう。
- ・ブリッジを支えている歯が傷んでしまい、結局、抜くことになってしまう。
- ・健康な歯とブリッジの見た目が違って見える。

部分入れ歯にしたら…

(P3 下)

- ・銀色のバネが見えてしまう。
- ・口臭が気になる。

総入れ歯にしたら…

(P4)

- ・ガタガタして、固いものが噛めない。
- ・食事の際、入れ歯と歯ぐきの間に食べ物が入り込む。
- ・歯ぐきがやせてくるので、作り直さないといけない。


インプラント治療を受けると そんな悩みが解決できます

天然の歯とほとんど変わらない感覚で、ものを噛んだり、
会話を楽しむことができます。




インプラント治療とは？

何らかの原因で失ってしまった歯の代わりに、顎の骨にチタン製のネジを埋め込み、かぶせ物をして人工の歯を作る治療です。失った歯をこれまでと同じように機能させることが可能な、画期的な治療法です。

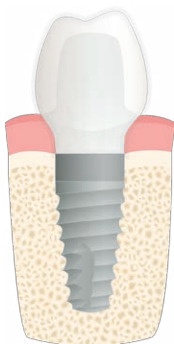

インプラントの構造

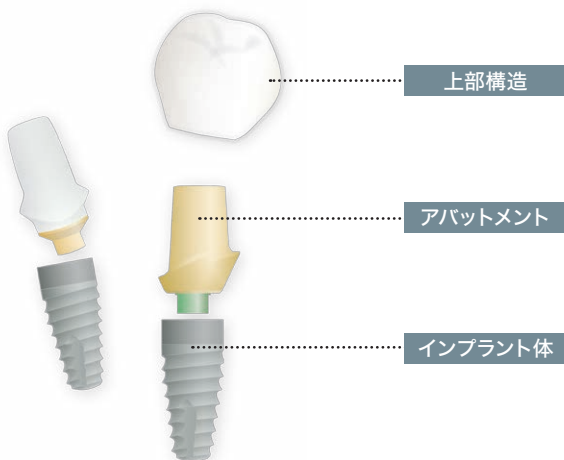

インプラントの利点

- 自分の歯と同じ感覚で食べることができる。
- 口元のコンプレックスの解消。
- 歯を失った部分のみを治療することで、他の歯に負担がかからない。

インプラント治療の種類

従来の治療法とは異なり、治療すべき部分以外に負担をかけず、天然歯と近い状態にすることが可能です。

前歯を1本失った場合

従来の治療法(ブリッジ)

- 両側の歯を削る必要があります。



インプラント治療

- 歯を削ることなく、自分の歯と同じような歯並びを再現できます。



奥歯を失った場合

従来の治療法(部分入れ歯)

- 金属の留め具などに違和感を感じ、見た目も良くありません。
- 固いものが食べにくい。



インプラント治療

- 留め具などがいないため、口の中に違和感を感じにくい。
- しっかり固定されているので、固いものも食べられます。



全ての歯を失った場合

従来の治療法(総入れ歯)

- ガタつきがあると食事がしにくい。
- 入れ歯がズレたり、食べ物が入って痛くなることがあります。



インプラント治療

- 自分の歯のような噛みごちで、食事ができます。入れ歯のように外れる心配ありません。
- 入れ歯の支えにインプラントを使うことで、入れ歯が外れたりガタつくことがなくなり、口元に安心感が持てます。



固定式上部構造



着脱式上部構造

インプラント治療の流れ

1


診査・診断

- ・インプラントを埋め込む顎の形や噛み合わせを診査するため、お口の中の型をとります。
- ・顎の骨の量や質を検査するためレントゲン撮影、またはCT撮影を行います。

2


手順

- ・麻酔をかけて行いますので、痛みはほとんどありません。骨を削りインプラントを埋め込み、カバーキャップを取り付けます。（骨の状態などによって、術式が異なります。）

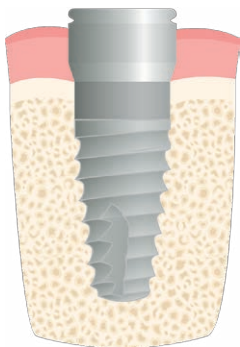

【1回法の手術の場合】

- ・厚みのあるキャップを取り付け、お口の中にその上面が見えるように手術を終了します。

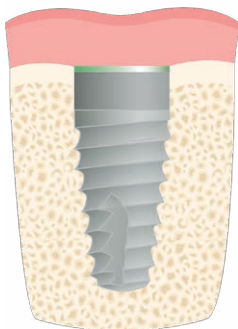


【2回法の手術の場合】

- ・薄型のカバーキャップを取り付けて粘膜を閉じ、一定の期間をおいて、厚みのあるキャップに取り替える二度目の手術を行います。

3

仮歯装着

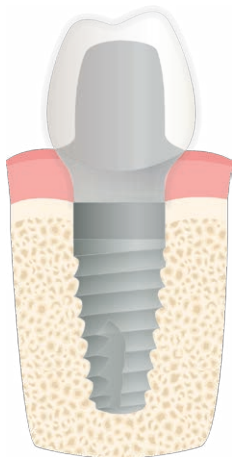


- ・歯ぐきが安定した時期に仮歯を作り、実際に使用していただきながら形態や装着感などを確認します。
- ・噛み合わせや強度に違和感があれば歯科医師と相談し、最終的な人工の歯の作製に入ります。

4

最終的な人工の歯の装着

- ・仮歯の装着で得た情報をもとに、歯並びや色をチェックし最終的な人工の歯を作製します。
- ・作製した人工の歯を装着し、治療が完了します。

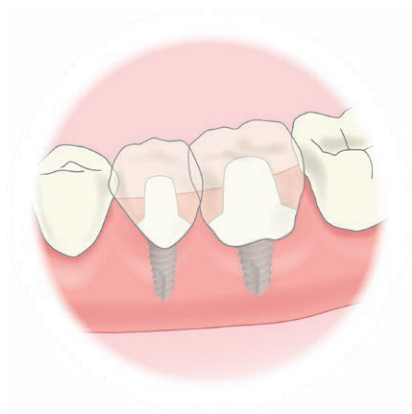

5

メンテナンス

- ・治療が終わった後も、定期検診と、ご自身による毎日のケアでメンテナンスしていきましょう。

Q&A

Q インプラント治療ができない人はいますか？

- A 以下の方はインプラント治療に向いていません。
- ・顎の骨の成長が終わっていない年齢の方
 - ・歯磨きなどの日常の清掃が十分にできない方
 - ・チタンなどの金属アレルギーを持っている方
 - ・アルコール依存症の方
 - ・骨粗鬆症で、BP(ビスフォスフォネート)製剤を使用されている方
 - ・喫煙されている方

Q 痛みはありますか？

- A 手術中は麻酔をかけますので、痛みはほとんどありません。また、お口の中は体の他の部分と比べると、治りやすい部分でもあります。実際に手術された患者さんの感想は、思ったよりも楽だったというものがほとんどです。

Q 手術時間はどれくらいですか？

- A 手術時間は、インプラントの本数や手術の難易度によって異なり、個人差がありますが、通常、1本30分～1時間程度です。

Q 費用はどれくらいかかりますか？

- A 症状や治療の内容により治療費は異なりますので、歯科医師にご相談ください。基本的にインプラント治療には健康保険が適用されませんが、医療費控除の対象になることもあります。

Q インプラントはどれくらいもちますか？

- A インプラントを長く快適に使っていくためには、歯科医師による定期検診と、ご自身による毎日のケアが必要となります。きちんとしたメンテナンスを継続することが大切です。

※上記の項目など、インプラント治療について歯科医師にご相談ください。

患者様情報

お名前

男 ・ 女

生年月日

年

月

日

検査日

年

月



日

記入日

年

月

日

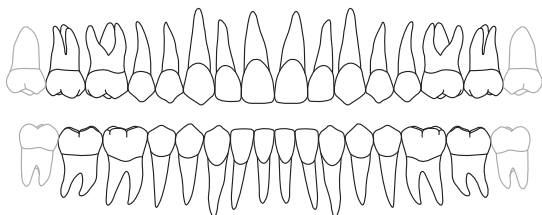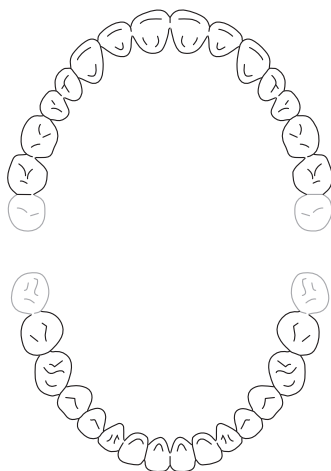

インプラント治療の手順


治癒期間は患者さんの状態によって異なる場合があります。歯科医師にご相談ください。

STEP 1

1回目の手術

インプラントを埋め込む手術を行います。

年 月 日

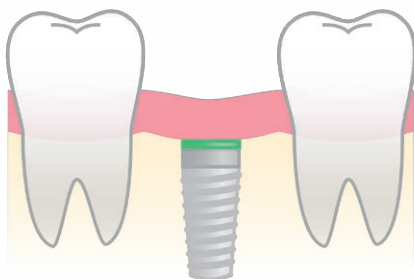

治癒期間

3ヶ月～6ヶ月

数ヶ月で骨とインプラントがしっかりと結合するまで治癒を待ちます。




STEP 2

2回目の手術

インプラントの頭を出す手術を行います。

年 月 日

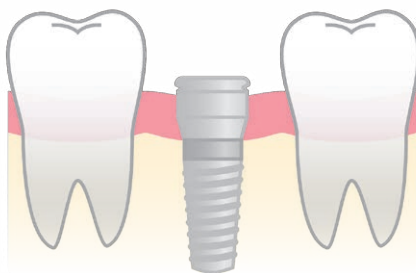

治癒期間

2週間～4週間

歯ぐきが安定するまで待ちます。




STEP
3

型取り

インプラントの上に、仮の歯を取り付けます。

年 月 日

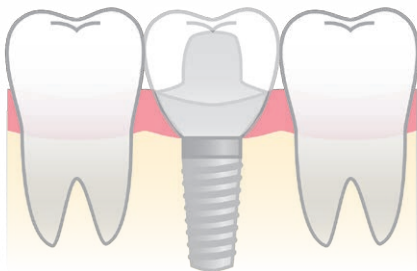

作製期間

1週間～2週間

型取りした情報をもとに、最終的な人工の歯を作製します。




STEP
4

完成

仮の歯から、最終的な人工の歯を装置します。

年 月 日

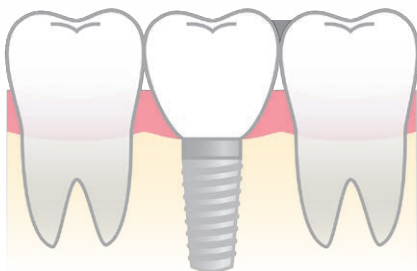

当院ではバイオホライズンズ社の
製品を使用しています。

バイオホライズンズインプラントとは

バイオホライズンズインプラントは世界 85 ヶ国以上で使用され、
日本はもとより世界中の歯科医師の方々に広く使用されています。



BioHorizons 社のインプラントは
世界 85 ヶ国以上で販売されています。

Caiman Dental
株式会社 カイマンデンタル